

CAREPUR Lejringspuder – Trekantet DELTAPUDE



CAREPUR Deltapude er et positioneringshjælpemiddel til krop, torso og ekstremiteter til både decubitusprofylakse og støtte til decubitusbehandling.

Deltapuden bruges hovedsageligt i 30° lateral lejrning, og dens rektangulære sider bruges til at støtte torso eller til at støtte benene. I denne position placeres puden direkte ved skulder-, ryg- eller bækkenregionen, hvor støtte er nødvendig. På grund af pudens brede underside og betrækkets skridsikre egenskaber sikrer dette en positioneringsstabilitet for patienten.

I rygliggende stilling er puden også velegnet – som blød positionering ved knæbøjning med samtidig trykfordeling omkring korsbenet, til at udføre dropfodsprofylakse, når puden placeres direkte ved fodsålen eller til 135° lejrning. I siddende stilling, som f.eks. i en kørestol kan Deltapuden bruges som støtte til en hemiparetisk arm.


Når puden anvendes, flytter polystyrenkuglerne inden i puden sig pga. trykbelastningen og tilpasser sig derved patientens kropskontur.

Produktspecifikation:

- Pudefyldet består af 100% polystyrenkugler (EPS) med små granulater
- Pudens skal desinficeres ved aftørring
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



CAREPUR Lejringspuder – Trekantet DELTAPUDE

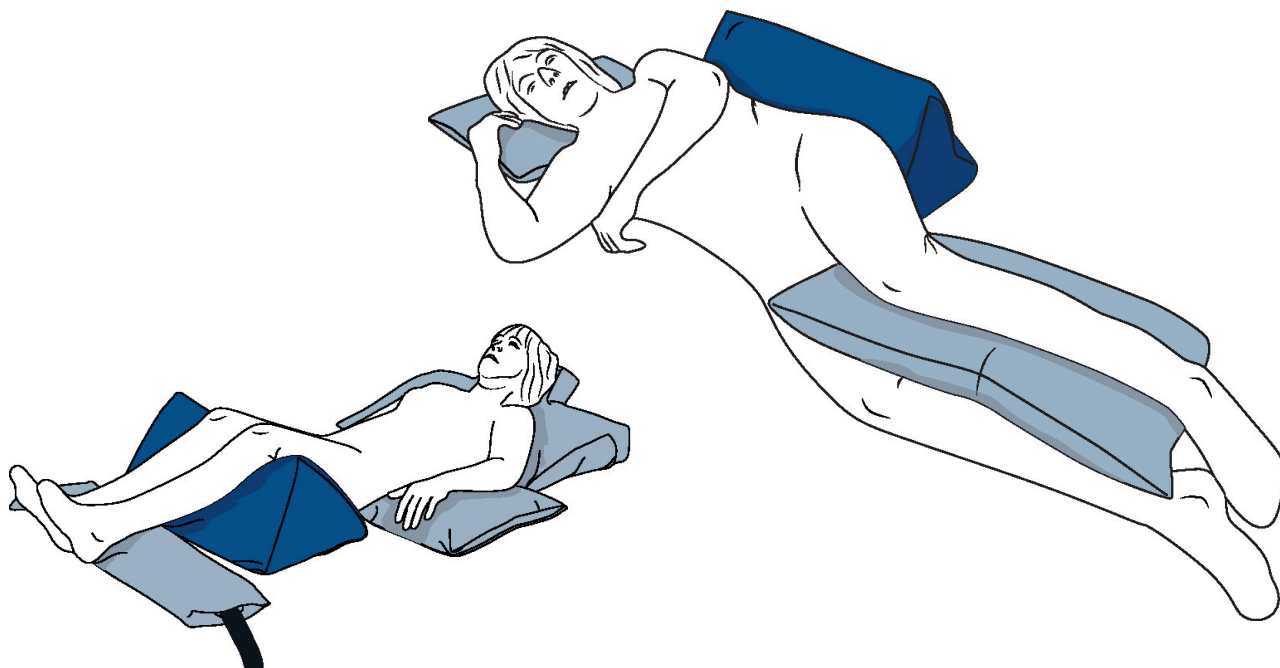

Varenavn	Varenr.	Str.	Mål (LxBxH)	Vægt	HMI-nr.
CAREPUR Deltapude, ORANGE	P43793	S	42 x 25 x 17 cm	0,47 kg	136285
CAREPUR Deltapude, BLÅ	P43794	M	60 x 40 x 20 cm	1,01 kg	136288



[CarePartner WebShop](#)

[Brugervejledning](#)