



Wheeleo® Rollatorstok er en énhandsrollator og firepunktsstok i ét og samme produkt, og det eneste ganghjælpemiddel, hvor brugeren kun skal anvende én hånd for kontinuerlig support.

Wheeleo® Rollatorstok muliggør en ubesværet og flydende gang, som opnås ved brug af en rollator, kombineret med det kompakte og stabile design fra en almindelig flerpunktsstok. Det let håndterlige ganghjælpemiddel med fire massive gummihjul sørger for en sikker og stabil gang uden at gå på kompromis med mobilitet og hjælper dermed brugeren i opretholdelse af selvstændigheden, selvtilliden og livsglæden.

Selvstændighed, selv med nedsat funktion:

Selvstændighed i dagligdagen er uvurderlig. Først og fremmest er Wheeleo® mindre og lettere end en rollator, og derfor nemmere at håndtere i trange omgivelser. Desuden viser et videnskabeligt studie* fra det Belgiske Universitetshospital, Centre Neurologique William Lennox, at den konstante kontakt med underlaget man får med en Wheeleo® betyder, at brugeren kan bevæge sig både hurtigere og mere sikkert og glidende, sammenlignet med brugere af en almindelig firepunktsstok.

Wheeleo® er aktiverende, brugervenlig og altid tæt ved hånden.

Produktspecifikation:

- Kan anvendes med både venstre og højre hånd
- Højdejustering: fra 77,5 cm til 101,5 cm
- Dimensioner: 38 x 42 cm
- Gummihjul: 100 mm – kan dreje 360°
- Max. brugervægt: 120 kg
- Vægt: 3,4 kg
- Fås i farverne hvid, blå og sort

Sikkerhed og stabilitet – derfor har Wheeleo ikke en bremser!

Et fald kan betyde alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser, hvorfor mange mennesker med funktionsnedsættelser vælger at få en flerpunktsstok eller en rollator – også før skaden er sket! Takket være dets rullende design, vil en Wheeleo altid være placeret i den rigtige oprejste position. Ved nedadgående tryk vil Wheeleo, på samme vis som ved en rollator, altid køre fremad i stedet at tilte. Der er derfor heller ikke behov for bremser for at forhindre brugeren i at falde. Tværtimod ville tilføjelsen af bremser til Wheeleo medføre højere risiko for, at stokken tilter.

Hvis brugeren mister balancen, vil brugeren automatisk skubbe sin Wheeleo® i en naturlig og stabil position uden at skulle løfte den fra jorden. Den rullende firepunktsstok er desuden justérbar i højden, og kan således tilpasses brugerens behov.

Hvem har gavn af en flerpunktsstok med hjul?

Wheeleo® Rollatorstok er ideel for mennesker med udfordringer, som for eksempel:

- Muskelsvaghed, kramper, gigt, eller lignende funktionsnedsættelser
- Personer med lammelse i den ene side (hemiplegi)
- Personer med nedsat kraft i arm eller hånd, eller andre handicap der involverer hånden eller armen
- Personer med synsforstyrrelser
- Velegnet til rehabilitering / genoptræning efter fald, sygdom eller hjerneskade, såsom slagtilfælde (apopleksi)
- Velegnet til personer, hvor en rollator bliver for stor / uhandy, men hvor en stok eller en traditionel flerpunktsstok samtidig ikke yder tilstrækkelig støtte

Model	Varenr.	HMI-nr.
Wheeleo, hvid	WH-500h	130211
Wheeleo, sort	WH-500s	-
Wheeleo, blå	WH-500b	-



* Læs bl.a. studiet og se produktvideoen [her](#)