



ProFem®'s skalformede prolapsring med eller uden en støttemembran bruges til **at lindre gener** forbundet med en **første-, anden- eller tredjegrads Uterusprolaps** (nedsunken livmoder), samt ved **Cystocele** (forvægsprolaps).

Ringene kan også bruges ved **stressinkontinens**. Selve knoppen på kanten giver mere støtte til Urethra (urinrøret) end et standard vaginalpessar med udskæring. Hullerne i støttemembran letter udtagning, idet vakuum slipper lettere.

Brugen af prolapsringe og vaginalpessarer er en veldokumenteret og effektiv metode inden for konservativ behandling af bækkenbundsproblemer som prolaps og inkontinens. Denne behandlingsform har været anvendt med stor succes i mange år og vinder stadig større popularitet som et skånsomt alternativ.

Prolapsringen tilbyder en enkel, økonomisk og fuldt reversibel løsning på både prolaps og stressinkontinens. De udgør et attraktivt alternativ til kirurgiske indgreb og de risici, som ofte er forbundet med sådanne operationer.

ProFem-produkterne er fremstillet i hypoallergen medicinsk silikone af høj kvalitet.

ProFem®-serien findes i mange forskellige former og størrelser, hvilket gør det muligt at tilpasse behandlingen individuelt og dække stort set alle behov ved bækkenbundslidelser og inkontinens.

For at finde den **korrekte ringstørrelse bør man starte med et Fitting-sæt**, som er produceret til sundhedsprofessionelle, som derved kan hjælpe patienten med at finde den mest effektive størrelse.

Der findes et Fitting-sæt til de fleste produkter i ProFem-serien, og består af de mest almindelige størrelser.

Prolapsringen er kun beregnet til én patient

Den kan genbruges ved at følge producentens anvisninger for korrekt rengøring og sterilisering.

Ringene kan rengøres med mild sæbe og varmt vand, og skal skylles grundigt efter med vand.

Patienten skal oplæres i isætning og udtagning af en sundhedsprofessionel.

Prolapsringen bør udtages og rengøres som en normal daglig rutine.

Den er godkendt til 150 rengørings- og steriliseringscyklusser.

Det er muligt at søge støtte til køb af disse produkter jf. Servicelovens §112 – i den kommune, hvori patienten har fast bopæl.

Vareoplysninger:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Varenavn
FS 7000	-	-	ProFem Uretha Shell Pessary Fitting Sæt
DSH50#0	145276	0	ProFem Uretha Shell Pessary, 50 mm
DSH55#1	145279	1	ProFem Uretha Shell Pessary, 55 mm
DSH60#2	145282	2	ProFem Uretha Shell Pessary, 60 mm
DSH65#3	145285	3	ProFem Uretha Shell Pessary, 65 mm
DSH70#4	145288	4	ProFem Uretha Shell Pessary, 70 mm
DSH75#5	145291	5	ProFem Uretha Shell Pessary, 75 mm
DSH80#6	145294	6	ProFem Uretha Shell Pessary, 80 mm
DSH85#7	145297	7	ProFem Uretha Shell Pessary, 85 mm
DSH50S#0	145303	0	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 50 mm
DSH55S#1	145306	1	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 55 mm
DSH60S#2	145309	2	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 60 mm
DSH65S#3	145312	3	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 65 mm
DSH70S#4	145315	4	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 70 mm
DSH75S#5	145318	5	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 75 mm
DSH80S#6	145321	6	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 80 mm
DSH85S#7	145324	7	ProFem Uretha Shell Pessary m/støtte, 85 mm

