




## ProFem® Kube Pessar

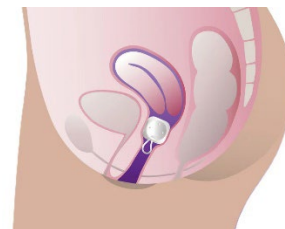

**ProFem® har udviklet et blødt kubeformet pessar til behandling af genital prolaps** (underlivs prolaps/nedsynkning).

Kube-pessaret yder støtte og kan lindre symptomer ved **Uterusprolaps** af 2. eller 3. grad, **Cystocele** (blæreprolaps) samt **Rectocele** (tarmprolaps).

Denne model i ProFem-serien findes både med og uden drænhuller. Med drænhuller fremmes afløb af vaginalsekret og udtagning af pessaret lettes. Ønskes en stærkere sugeseffekt til vaginalvæggen, skal kuben bestilles uden drænhuller.

Brugen af vaginale pessarer er en veldokumenteret og effektiv metode inden for konservativ behandling af bækkenbundsproblemer som prolaps og inkontinens.

Denne behandlingsform har været anvendt med stor succes i mange år og vinder stadig større popularitet som et skånsomt alternativ.

Vaginale pessarer tilbyder en enkel, økonomisk og fuldt reversibel løsning på både prolaps og stressinkontinens. De udgør et attraktivt alternativ til kirurgiske indgreb og de risici, som ofte er forbundet med sådanne operationer.

ProFem®-serien er fremstillet i hypoallergen medicinsk silikone af høj kvalitet, og findes i mange forskellige former og størrelser, hvilket gør det muligt at tilpasse behandlingen individuelt og dække stort set alle behov ved bækkenbunds-lidelser og inkontinens.

For at finde den **korrekte kubestørrelse bør man starte med et Fitting-sæt**, som er produceret til sundhedsprofessionelle, som derved kan hjælpe patienten med at finde den mest effektive størrelse. Der findes et Fitting-sæt til de fleste produkter i ProFem-serien.

**Kube-pessaret er kun beregnet til én patient**

Pessaret kan genbruges ved at følge producentens anvisninger for korrekt rengøring og sterilisering.

Det kan rengøres med mild sæbe og varmt vand, og det skal skylles grundigt efter med vand.

Patienten skal oplæres i indføring og udtagning af en sundhedsprofessionel.

Pessaret bør udtages og rengøres som en normal daglig rutine.

Det er godkendt til 150 rengørings- og steriliseringscykluser.

**Det er muligt at søge støtte til køb af disse produkter jf. Servicelovens §112 – i den kommune, hvori patienten har fast bopæl.**

**Vareoplysninger:**

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Varenavn
FS 2000	-	-	ProFem Cube Pessary Fitting Sæt
CU25#0	146164	0	ProFem Cube Pessary, 25 mm
CU29#1	146168	1	ProFem Cube Pessary, 29 mm
CU33#2	146171	2	ProFem Cube Pessary, 33 mm
CU37#3	146174	3	ProFem Cube Pessary, 37 mm
CU41#4	146175	4	ProFem Cube Pessary, 41 mm
CU45#5	146178	5	ProFem Cube Pessary, 45 mm
CU50#6	146181	6	ProFem Cube Pessary, 50 mm
CU56#7	146184	7	ProFem Cube Pessary, 56 mm
CU63#8	146187	8	ProFem Cube Pessary, 63 mm
CU70#9	146190	9	ProFem Cube Pessary, 70 mm
CU75#10	146193	10	ProFem Cube Pessary, 75 mm
CU25D#0	146196	0	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 25 mm
CU29D#1	146199	1	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 29 mm
CU33D#2	146202	2	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 33 mm
CU37D#3	146205	3	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 37 mm
CU41D#4	146208	4	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 41 mm
CU45D#5	146211	5	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 45 mm
CU50D#6	146214	6	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 50 mm
CU56D#7	146217	7	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 56 mm
CU63D#8	146220	8	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 63 mm
CU70D#9	146223	9	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 70 mm
CU75D#10	146226	10	ProFem Cube Pessary m/drænhuller, 75 mm

