


ProFem® Marland Prolapsring

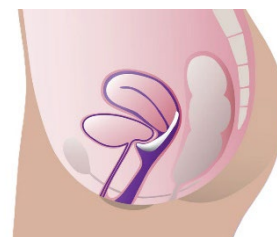

ProFem®'s Marland Prolapsring med eller uden en støttemembran bruges til at behandle symptomer på **Uterusprolaps** (nedsunken livmoder) af 2. eller 3. grad og **Cystocele** (forvægsprolaps).

På grund af den forhøjede ring kan Marland Prolapsring også anvendes ved symptomer på stressinkontinens. Hullerne i støttemembranen letter udtagning, idet vakuum slipper lettere.

Brugen af prolapsringe og vaginalpessarer er en veldokumenteret og effektiv metode inden for konservativ behandling af bækkenbundsproblemer som f.eks. en prolaps eller inkontinens.

Denne behandlingsform har været anvendt med stor succes i mange år og vinder stadig større popularitet som et skånsomt alternativ.

ProFem's produkter tilbyder en enkel, økonomisk og fuldt reversibel løsning på både prolaps og stressinkontinens. De udgør et attraktivt alternativ til kirurgiske indgreb og de risici, som ofte er forbundet med sådanne operationer.

Marland er fremstillet i hypoallergen medicinsk silikone af høj kvalitet.

ProFem®-serien findes i mange forskellige former og størrelser, hvilket gør det muligt at tilpasse behandlingen individuelt og dække stort set alle behov ved bækkenbundslidelser og inkontinens.

For at finde den **korrekte størrelse bør man starte med et Fitting-sæt**, som er produceret til sundhedsprofessionelle, som derved kan hjælpe patienten med at finde den mest effektive størrelse. Der findes et Fitting-sæt til de fleste produkter i ProFem-serien, og det består af de mest almindelige størrelser.

Prolapsringen er kun beregnet til én patient

Ringene kan genbruges ved at følge producentens anvisninger for korrekt rengøring og sterilisering.

Den kan rengøres med mild sæbe og varmt vand, og skylles grundigt efter med vand.

Patienten skal oplæres i indføring og udtagning af en sundhedsprofessionel.

Prolapsringen bør udtages og rengøres som en normal daglig rutine.

Den er godkendt til 150 rengørings- og steriliseringscyklusser.

Det er muligt at søge støtte til køb af disse produkter jf. Servicelovens §112 – i den kommune, hvori patienten har fast bopæl.

Vareoplysninger:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Varenavn
FS 8000	-	-	ProFem Marland Pessary Fitting Set
M2.25#2	145790	2	ProFem Marland Pessary, 58 mm
M2.50#3	145793	3	ProFem Marland Pessary, 64 mm
M2.75#4	145796	4	ProFem Marland Pessary, 70 mm
M3.00#5	145799	5	ProFem Marland Pessary, 76 mm
M3.25#6	145802	6	ProFem Marland Pessary, 83 mm
M3.50#7	145805	7	ProFem Marland Pessary, 89 mm
M3.75#8	145808	8	ProFem Marland Pessary, 95 mm
M2.25S#2	145811	2	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 58 mm
M2.50S#3	145814	3	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 64 mm
M2.75S#4	145817	4	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 70 mm
M3.00S#5	145820	5	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 76 mm
M3.25S#6	145823	6	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 83 mm
M3.50S#7	145826	7	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 89 mm
M3.75S#8	145829	8	ProFem Marland Pessary – m/støttemembran, 95 mm

